

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO CONFORT® Plus.

HYLO CONFORT® Plus

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml

Pour l'hydratation intensive, thérapeutique de la surface de l'œil en cas de sensation de sécheresse oculaire sévère et chronique ainsi qu'après une intervention chirurgicale ophtalmique.

Solution stérile, sans phosphates et sans agents conservateurs

Qu'est-ce qu'HYLO CONFORT® Plus ?

HYLO CONFORT® Plus est une solution stérile, sans phosphates et sans agents conservateurs pour utilisation ophtalmique.

Composition :

1 ml d'HYLO CONFORT® Plus contient 2 mg d'hyaluronate de sodium, de l'acide citrique anhydre, du citrate de sodium, du sorbitol et de l'eau pour préparations injectables.

Pourquoi utiliser HYLO CONFORT® Plus ?

Pour l'hydratation intensive, thérapeutique de la surface de l'œil en cas de sensation de sécheresse oculaire sévère et chronique ainsi qu'après une intervention chirurgicale ophtalmique.

Dans quels cas utiliser HYLO CONFORT® Plus ?

HYLO CONFORT® Plus est indiqué pour le traitement de la sécheresse oculaire.


HYLO CONFORT® Plus contient le sel de sodium de l'acide hyaluronique, une substance naturelle, qui se trouve dans l'œil et dans d'autres parties du corps. Grâce à ses propriétés particulières, il forme un film hydratant régulier, stable et adhérent particulièrement longtemps sur la surface de l'œil, qui ne peut être éliminé rapidement. Grâce à cette caractéristique bioadhésive ajoutée aux larmes naturelles, la cornée et la conjonctive sont soignées et la lubrification est idéale pour le battement de paupière. HYLO CONFORT® Plus contient une quantité particulièrement élevée d'acide hyaluronique et est donc très visqueux. L'œil est ainsi recouvert d'un film humide stable particulièrement intensif et durable.

Les troubles continus ou plus importants sont soulagés et l'œil est durablement protégé des irritations. La régénération des tissus superficiels de l'œil exige continuellement une hydratation suffisante. L'utilisation d'HYLO CONFORT® Plus hydrate la cornée et la conjonctive pendant une longue période, soutenant ainsi le déroulement optimal du processus de guérison physiologique.

HYLO CONFORT® Plus est sans agents conservateurs, ainsi il est généralement très bien toléré. De plus, HYLO CONFORT® Plus est sans phosphates, ce qui permet d'éviter des complications éventuelles dues à la formation de dépôts sur la cornée.


Comment utiliser HYLO CONFORT® Plus ?

N'utilisez HYLO CONFORT® Plus que lorsque l'emballage extérieur est scellé de façon intacte avant la première utilisation ().

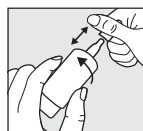


Étape 1 :

Retirer le capuchon avant chaque utilisation. Pour ce faire, tenir le capuchon et le flacon. Retirer le capuchon en opérant un mouvement de rotation. Avant la première application d'HYLO CONFORT® Plus, maintenir le flacon à l'envers avec l'embout compte-gouttes en position verticale et appuyer plusieurs fois sur le fond du flacon jusqu'à ce que la première goutte sorte à l'embout du flacon. Le flacon est ainsi prêt à l'emploi pour les applications suivantes.

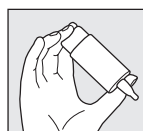

Étape 2 :

Maintenir le flacon avec l'embout compte-gouttes vers le bas, en plaçant le pouce sur l'épaule du flacon et les autres doigts sur le fond du flacon

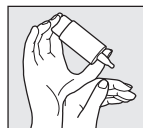


Étape 3 :

Comme indiqué, soutenir de la main libre la main tenant le flacon COMOD®.



Étape 4 :

Lors de l'application du collyre, veuillez éviter tout contact entre l'embout du flacon et votre œil ou votre peau. Incliner la tête légèrement en arrière ; de la main libre, éloigner délicatement la paupière inférieure de l'œil et appuyer rapidement et vigoureusement au centre du fond du flacon. Ceci actionne le mécanisme de délivrance d'une goutte. Grâce à la technique spéciale de valve du système COMOD®, la taille et la vitesse des gouttes sont toujours identiques, même en cas de pression très forte exercée sur le fond du flacon. Fermer lentement l'œil, afin d'assurer une répartition régulière du liquide à la surface de l'œil.

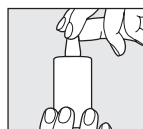

Étape 5 :

Après utilisation, replacer directement et soigneusement le capuchon sur l'embout compte-gouttes. S'assurer que l'embout compte-gouttes est bien sec.

Veuillez contacter le fabricant en cas de questions sur l'utilisation correcte de ce dispositif médical.

Un flacon contenant 10 ml de solution correspond à environ 300 gouttes. Pour des raisons techniques, une faible quantité résiduelle de liquide reste toujours dans le flacon.

HYLO CONFORT® Plus convient pour un traitement à long terme et peut être utilisé par les adultes et les enfants sans limitation d'âge.

Chaque flacon d'HYLO CONFORT® Plus ne doit être utilisé que par la même personne ().

Quelles sont les consignes d'utilisation complémentaires à respecter ?

En cas de traitement complémentaire avec un autre collyre, un intervalle de 30 minutes au moins doit être respecté entre les deux applications. HYLO CONFORT® Plus doit toujours être appliqué en dernier lieu. Par contre, une pommade ophtalmique doit toujours être appliquée dans le sac conjonctival après HYLO CONFORT® Plus.

Si vous ne vous sentez pas mieux ou si vous vous sentez plus mal après plusieurs jours d'utilisation, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grâce à l'absence d'agents conservateurs, HYLO CONFORT® Plus est particulièrement bien toléré même en cas d'utilisation prolongée. Dans de très rares cas, des réactions indésirables telles qu'une hypersensibilité, une sensation de brûlure ou un larmoiement excessif, une douleur, une sensation de corps étranger ou d'autres irritations locales temporaires ont été rapportées et ont cessé après l'arrêt de l'utilisation d'HYLO CONFORT® Plus.

En raison de la viscosité de la préparation, une vision floue temporaire est possible juste après l'utilisation d'HYLO CONFORT® Plus. Dans de très rares cas, cela peut provoquer des maux de tête temporaires chez les patients sensibles.

HYLO CONFORT® Plus soulage les symptômes de sécheresse oculaire sévères ou persistants. Si votre ophtalmologue a permis que vous portiez des lentilles de contact en dépit de ces symptômes, vous pouvez utiliser HYLO CONFORT® Plus pendant que vous portez des lentilles de contact. Néanmoins, il pourrait apparaître des traces de frottements sur les lentilles de contact, toutefois elles disparaîtront après quelques clignements d'yeux.

Afin d'éviter des réactions d'intolérances, pouvant être causées par des interactions entre HYLO CONFORT® Plus et les produits de soin pour lentilles de contact, nous vous conseillons d'attendre environ 30 minutes après la pose des lentilles de contact pour instiller le collyre.

Selon les connaissances actuelles, HYLO CONFORT® Plus peut être utilisé chez les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent.

Si un incident grave s'est produit pendant l'utilisation de ce dispositif médical ou à la suite de son utilisation, veuillez le rapporter au fabricant ().

Quelles sont la posologie et la durée d'utilisation d'HYLO CONFORT® Plus ?

En général, il convient d'instiller 1 goutte d'HYLO CONFORT® Plus 3 fois par jour dans le sac conjonctival de chaque œil.

En cas de troubles plus importants, HYLO CONFORT® Plus peut être instillé plus fréquemment. Si vous utilisez HYLO CONFORT® Plus plus fréquemment (par exemple plus de 10 fois par jour) ou si vos troubles persistent, veuillez consulter votre ophtalmologue ou votre pharmacien.

Dans quels cas ne pas utiliser HYLO CONFORT® Plus ?
HYLO CONFORT® Plus ne peut pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Quelles sont les consignes de conservation d'HYLO CONFORT® Plus ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C ( 25 °C).
HYLO CONFORT® Plus se conserve 6 mois après la première ouverture.
Ne pas utiliser après la date de péremption ().

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Jetez ce dispositif médical dans les ordures ménagères conformément à votre législation nationale. Cette mesure contribuera à la protection de l'environnement.

Les emballages suivants sont disponibles :

10 ml collyre en solution

Dernière mise à jour : Juin 2022

 URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Allemagne

 Laboratoires URSAPHARM S.A.S.

7, Rue Denis Papin

57200 Sarreguemines

France

Tél : 03 87 02 06 08

Fax : 03 87 09 77 90

E-Mail : info@ursapharm.fr

www.ursapharm.fr



Symbole :	Explication :
	Fabricant
	Distributeur
	Dispositif médical
	Marquage CE
	Stérilisé à l'aide de techniques de traitement aseptique
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
	Numéro de lot
	À utiliser avant [AAAA-MM]
	Consulter le mode d'emploi
	A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
	Un seul patient – à usage multiple

